

Portable Oxygen Set AMIE

เกจวัดแรงดันพร้อมถ้วยน้ำฟั่นละออง

1. หน้าปัดวัดแรงดัน
2. หลอดแสดงระดับอัตราการไหล
3. ตัวปรับอัตราการไหล
4. ถ้วยน้ำฟั่นละออง
5. เกลียวดต่อ

Flowmeter Regulator with Humidifier

- Pressure gauge
- Flowmeter
- Flow adjusting knob
- Humidifier
- Inlet connection



ส่วนประกอบ

- ถังบรรจุก๊าซเหล็กแบบไร้ตะเข็บ
- เกจวัดแรงดันแบบ Flowmeter
- สายหายใจรุ่นแยงงจุมุก
- รถเข็น

วิธีการใช้งาน

- ต่อเกจหายใจเข้ากับหัววาล์วของท่อจากนั้นขันเกลียวด้วยประแจเพื่อให้เกจวัดแรงดันยึดติดกับหัววาล์วจนแน่น
- เปิดวาล์วออกซิเจนที่หัววาล์ว เข็มบนหน้าปัดจะแสดงระดับแรงดันในถัง
- หากพบมีการรั่วไหล ให้ปิดวาล์วทันที และตรวจสอบการติดตั้งเกจวัดแรงดันอีกครั้ง
- ต่อสายยางหายใจเข้าที่หัวจ่ายก๊าซ
- เริ่มจ่ายก๊าซออกซิเจนโดยปิดที่ตัวปรับ flow ด้านหน้าของเกจวัดแรงดัน โดยสามารถปรับความแรงของก๊าซได้ตั้งแต่ 0 - 15 ลิตร/นาที
- ปิดตัวปรับ flow และปิดหัววาล์วทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

Content

- Seamless steel Cylinder
- Flowmeter Regulator with Humidifier
- Breathing Cannula
- Cylinder cart

Usage Instruction

- Install the regulator onto the cylinder valve. Ensure that inlet connection of the regulator is perfectly fitted into valve's outlet connection. Tighten the regulator by wrench.
- Open the cylinder valve. The Pressure Gauge will display tank's oxygen pressure.
- If leaking sound is heard, close the valve immediately and recheck if installation of regulator is properly handled.
- Connect breathing cannula into the Gas Outlet.
- Adjust the Flow Adjust Dial to obtain oxygen. Oxygen flow can be adjusted from 0-15 liter/minute.
- Turn off the Flow Adjust Dial and close the cylinder valve after use.

