


## ชุดออกซิเจนหายใจ MINI-O<sub>2</sub>

AMERWAY  
MEDICAL GAS EQUIPMENT

### Portable Oxygen Set MINI-O<sub>2</sub>

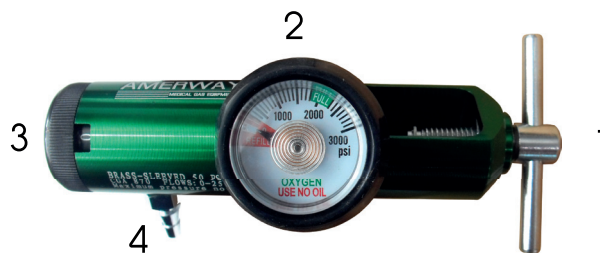

#### ส่วนประกอบ

1. ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน
2. เกจวัดแรงดันแบบ CLICKFLOW
3. สายหายใจรุ่นแฉงจุมุก
4. กระเป๋าสะพาย

#### เกจวัดแรงดัน

1. ก้านขันยัดกับหัววาล์ว
2. หน้าปัด
3. ตัวปรับอัตราการไหล
4. หัวจ่ายก๊าซ

#### Regulator

- Valve Tighten Lever  
Pressure Gauge  
Flow Adjusting Dial  
Gas Outlet

#### วิธีใช้งาน

- สวมเกจวัดแรงดันเข้ากับด้านบนหัววาล์ว โดยให้ตำแหน่งขา 2 ขา ของเกจวัดแรงดันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับรู 2 รู ของหัววาล์ว จากนั้นใช้มือขันก้านหมุนเพื่อให้เกจวัดแรงดันยึดติดกับหัววาล์วจนแน่น
- เปิดวาล์วออกซิเจนที่หัววาล์ว เข็มบนหน้าปัดจะแสดงระดับแรงดันในถัง
- หากพบมีการรั่วไหล ให้ปิดวาล์วทันที และตรวจสอบการติดตั้งเกจวัดแรงดันอีกครั้ง
- ต่อสายหายใจเข้าที่หัวจ่ายก๊าซ
- เริ่มจ่ายก๊าซออกซิเจนโดยบิดที่ตัวปรับ flow (วงกลมสีดำ) ด้านซ้ายของเกจวัดแรงดัน โดยสามารถปรับความแรงของก๊าซได้ตั้งแต่ 0 - 15 ลิตร/นาที
- ปิดตัวปรับ flow และปิดหัววาล์วทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

#### Content

- Aluminum Cylinder
- Click-Flow Regulator
- Breathing Cannula
- Carrying Bag

#### Usage Instruction

- Install the regulator onto the cylinder valve. Ensure that 2 pins of the regulator are perfectly fitted into valve's inlet holes. Tighten the regulator by turning the Valve Tighten Lever.
- Open the cylinder valve. The Pressure Gauge will display tank's oxygen pressure.
- If leaking sound is heard, close the valve immediately and recheck if installation of regulator is properly handled.
- Connect breathing cannula into the Gas Outlet.
- Adjust the Flow Adjust Dial to obtain oxygen. Oxygen flow can be adjusted from 0-15 liter/minute.
- Turn off the Flow Adjust Dial and close the cylinder valve after use.

## ชุดออกซิเจนหายใจ MINI-O<sub>2</sub>



### Portable Oxygen Set MINI-O<sub>2</sub>

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดถัง	ปริมาณลิตรน้ำ	แรงดันเต็มถัง (PSI)	อัตราการไหล ลิตร/นาที	ระยะเวลาการใช้งาน (ชั่วโมง)*
0.6 คิว	4	2000	3	3
0.5 คิว	3.4	2000	3	2.5
0.3 คิว	2	2000	3	1.5

\*ที่อัตราการไหล 3 ลิตร/นาที