

ชุดออกซิเจนหายใจ MINI-O₂ รุ่น IVR-2

AMERWAY
MEDICAL GAS EQUIPMENT

Portable Oxygen Set MINI-O₂ (IVR-2L)

เกร์วาล์ว

1. หน้าปัด
2. ตัวปรับอัตราการไหล
3. หัวเติมก๊าซ CGA 540 และฝาปิด
4. ช่องจ่ายก๊าซแบบ DISS
5. หัวจ่ายก๊าซ
6. ที่จับ

Integrated Valve Regulator

- Pressure gauge
- Flow Adjusting Dial
- Flow Adjusting Dial
- DISS Outlet
- Gas Outlet
- Handle

ส่วนประกอบ

- ถังบรรจุก๊าซอลูมิเนียมขนาด 2 ลิตร
- เกร์วาล์ว
- สายหายใจรุ่นแยงจุมุก

วิธีใช้งาน

- เช็มนบนหน้าปัดจะแสดงระดับแรงดันในถัง
- หากพบมีการรั่วไหลให้ตรวจสอบการติดตั้งเกร์วาล์วว่าแน่นหรือไม่
- ต่อสายหายใจเข้ากับหัวจ่ายก๊าซ
- เริ่มจ่ายก๊าซออกซิเจนโดยบิดที่ตัวปรับ flow ด้านบนของเกร์วาล์ว โดยสามารถปรับความแรงของก๊าซได้ตั้งแต่ 0 - 15 ลิตร/นาที
- ปิดตัวปรับ flow ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

Content

- 4-Liter Aluminum Cylinder
- Integrated regulators
- Breathing Cannula

Usage Instruction

- The Pressure Gauge will display cylinder's oxygen pressure.
- If leaking sound is heard, close the valve immediately and recheck if installation of Integrated valve regulator is tight.
- Connect breathing cannula into the Gas Outlet.
- Adjust the Flow Adjust Dial to obtain oxygen. Oxygen flow can be adjusted from 0-15 liter/minute.
- Turn off the Flow Adjust Dial after use.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดถัง	ปริมาณลิตรน้ำ	แรงดันเต็มถัง (PSI)	อัตราการไหล ลิตร/นาที	ระยะเวลาการใช้งาน (ชั่วโมง)*
0.3 คิว	2	2000	3	1.5

*ที่อัตราการไหล 3 ลิตร/นาที

